


消毒方法



1. 用中亲消毒锅消毒

中亲负离子·消毒·烘干·智能一体机是专为快速消毒而设计的，可以快速且轻松地进行消毒，所有的吸乳器的零部件皆可使用消毒器进行消毒（主机、吸管和 USB 线除外）。

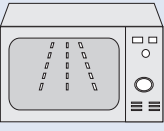


2. 在微波炉中以蒸汽消毒：

用微波炉消毒时，请使用消毒容器或消毒袋，消毒时，容器里一定要有水




3. 煮沸：

每天将吸乳器（除主机、吸管和 USB 线）置于沸水中消毒 5 分钟，注意水量不能低于被消毒的部件，部件不能直接接触无水的发热锅底，以免烫伤部件。

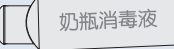

4. 奶瓶消毒液：

请使用专业消毒奶瓶和奶嘴的奶瓶消毒液进行消毒。

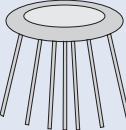

5. 其他方法：

请不要采用干式加热、紫外线 (UV) 或洗碗机、烘干机进行消毒。以免伤害到吸乳器零件。

- 附注：
- ★消毒之后要彻底风干；
 - ★使用消毒设备时，务必要按照厂商的说明进行。
 - ★清洗阀门上的乳汁时要小心以免尖端受损。
 - ★建议使用中亲消毒锅进行消毒吸乳器
 - ★请勿使用坚硬的刷子或去污粉。

请勿用水清洗电子零件。

请避免使用湿布擦拭电子零件。

使用吸乳器时，若附近有水，请务必小心。

母乳的储存及加热

储存母乳

吸取母乳完毕，盖紧奶瓶盖或储存袋，必须立即放入冰箱，用冷藏或冷冻皆可。吸取的母乳放冰箱冷藏保存 24 小时，冷冻则能保存 3 个星期左右。

刚收集的母乳	室 温	冰箱冷藏室	冰箱冷冻室
	不要在室温下保存	保存 24 小时	保存 3 个星期左右

加热母乳

解冻后您可选中亲暖奶器加热，加热后的母乳就可以哺乳您的宝宝。

注意事项

1. 如果要冷冻母乳，不要将瓶子 / 袋子装满，装至 3/4 处即可，给结冰膨胀后留好空间，不要将母乳放置冰箱门侧保存。
2. 解冻后的母乳不能再次冷冻，请不要将新鲜的母乳和解冻的母乳混在一起。
3. 请勿用微波炉和沸水加热，以免造成营养损失。



环保清单

该标志含义为环境保护使用期限。根据中国“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及中国电子行业标准 SJ / T11364 “电子电气产品有害物质限制使用标识要求”，该标志要印制在中国境内售卖的电子电气产品上。

此标识期限 (10 年)，为产品在正常使用的情况下其有害物质或危险物质不会泄漏期限，而不是保证产品使用性能期限。该电子电器产品含有某些有害物质在环保使用期限内可以放心使用。电子电器产品使用结束或废弃时，请遵从电器电子产品法律法规与回收·循环利用等相关的各地方法律规定。

有害物质或元素名称及含量的标示方式						
部件名称	有害危险物质和元素					
元素名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
气泵组件	×	○	○	×	×	×
电路板组件	×	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○
电池组	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ / T11364-2014 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB / T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB / T 26572 规定的限量要求。

标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

母乳喂养的好处

对妈妈和宝宝来说，母乳喂养是最自然最有益的活动之一。没有任何其他一个行为能如此巨大的影响宝宝目前和将来的健康。

没有一种配方奶可以复制母乳独一无二的特征，无论向其中加入多少维生素、矿物质和补充剂，本质上还是属于配方奶。

母乳是人类婴儿唯一一种天然、完全和复合营养。同样重要的是，母乳喂养促进了妈妈和宝宝之间异乎寻常的情感关系，这是只有妈妈才能给予的。

售后服务及保修

- ★自购买日起正常使用者享有一年免费维修服务。
- ★请先直接与经销商接洽。
- ★遇下列情形本公司需按价收费：①超过保修期。 ②未出示本保修卡。
- ③保修卡填写内容与实物不符合者，填写模糊无法辨认者。
- ④部分配件耗材不在保修范围内。
- ★维修时请出示此卡及购买凭证或发票方有效。

售后服务表			
顾客姓名		顾客电话	
产品名称		产品型号	
家庭住址			
邮政编号			
原因：			

维修记录表			
维修日期	故障情况	维修结果	备注

- 【非保修范围】
- ★使用不慎或错误而导致的损害。
 - ★自行检修改装及不当的移动。
 - ★本保修卡遗失或损毁。
 - ★因天灾或外力破坏者。
 - ★保修期间外修理的服务，需收取零件费及技术服务费。



慈溪亲宝电器有限公司 | 地址：浙江省慈溪市横河镇相士地村轴承路8号
Cixi Kissbaby Electrical Appliance Co., Ltd. | ADD:xiangshidi village,henghe town,cixi city,zhejiang

官网: www.zqmy.net 全国客服热线: 400-188-9820



0%BPA

智能单侧吸奶器

使用说明书

- Pursuit of Excellence & Continuous Innovation
- Whole-hearted Service Just For You



货号：DP50 型号：ZQ-2520


恭喜您的宝宝诞生！您很快就会发现用母乳喂养宝宝是非常值得的经验。母乳会为您的宝宝提供健康发育所需的最佳营养。

智能单侧吸奶器会模拟宝宝的吮吸动作，为以母乳喂养的妈妈们提供舒适且无疼痛感的服务。为了正确且安全的使用吸乳器，请仔细阅读这些说明，并将说明书摆在随手可得的地方，以便将来参考。

产品特点

- ★大吸力，8 档调节，操作更方便。
- ★内置 900mA 锂电池随时随地安心使用。
- ★加大硅胶乳垫，多点按摩，仿真吸乳，乳汁更多。
- ★完全做到“零倒流”，解决业界难题。如不小心将奶瓶翻倒，也不会使乳汁流回主机，导致机器损坏。
- ★德国技术，静音设计。
- ★本产品采用优质原材料，融合中国家庭式精心设计制作，具有外形美观大方，结构精巧，坚固实用等特点。
- ★食品级要求无毒塑料，不含双酚 A, 让您和宝宝安心使用。
- ★轻巧设计，携带方便。

产品组件图

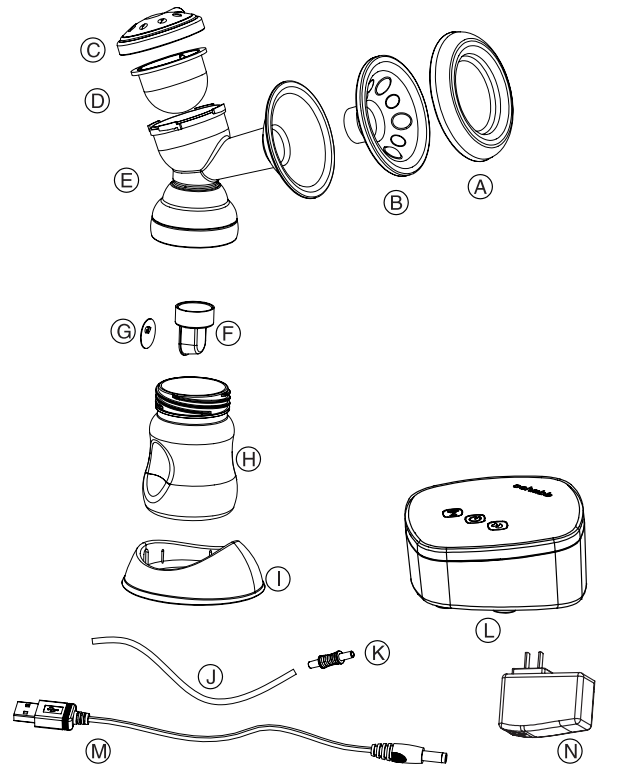

编号	名称	材料	耐热温度	耐冷温度	数量
A	防尘盖	PP	110℃	-20℃	1
B	喇叭硅胶	硅胶	200℃	-20℃	1
C	气缸盖	PP	110℃	-20℃	1
D	气缸	硅胶	200℃	-20℃	1
E	三通	PP	110℃	-20℃	1
F	防漏阀	PP	110℃	-20℃	1
G	防漏阀硅胶	硅胶	200℃	-20℃	1
H	奶瓶	PP	110℃	-20℃	1
I	奶瓶底座	PP	110℃	-20℃	1
J	气管	PVC	80℃	-20℃	1
K	吸管接头	PP	110℃	-20℃	1
L	主机	-	-	-	1
M	USB 线	-	-	-	1
N	适配器	-	-	-	1

电源适配器 CCC 证书

警告与注意事项

⚠ 警告：奶嘴


- ★奶嘴可能被咬破，对于正在长牙的宝宝要特别注意，奶嘴如果磨损，坏掉或穿孔应及时更换。每次使用前都需检查奶嘴。
- ★如奶嘴直接暴晒在阳光下或长时间浸泡在消毒液中，会导致奶嘴易磨损及坏掉。
- ★首次使用之前，请放入沸腾的水中 5 分钟进行消毒。
- ★每次使用之前都要清洗消毒，使用本产品时一定要有成年人在旁边照顾。
- ★请不要将奶嘴当成安抚奶嘴使用，持续使用且延长吸食奶嘴的时间容易造成蛀牙。
- ★喂食前一定要检查乳汁的温度，以免宝宝烫伤。

注意事项


- ★气管不可高温消毒，在使用前需确保气管内无水珠，如有水珠，可能导致主机不工作。
- ★请勿用水清洗或湿布擦拭主机。如主机不小心落入水中，切勿通电，若正在充电时请勿触摸，立即将电源适配器插头从电源插座上拔掉。
- ★使用之后一定要将电源适配器从电源插座上拔掉。
- ★严禁在浴室或靠近水的地方使用吸乳器。
- ★每次使用之前都要仔细检查本产品，包括主机，其他吸乳器配件，如发现问题及损坏，请停止使用。
- ★如果主机不能正常运转，请参考“故障排除”
- ★请不要将主机及电源适配器留在可能出现高温的地方（例如汽车内）
- ★吸乳器由小零件组成，小心不要让您的宝宝将任何零件放入口中。
- ★如果使用吸乳器感到疼痛，请向医生或母乳喂养顾问请教。
- ★勿让孩子接触到本产品。
- ★不要将本产品用于任何非本手册中描述之用途。
- ★非专业人员，不可自行分解装置。
- ★只能使用吸乳器所附的零件或其它经过授权的中亲零件。

组装方式


开始组装吸乳器前，请先洗净双手，使用前务必消毒各部件。

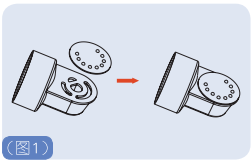


（图1）

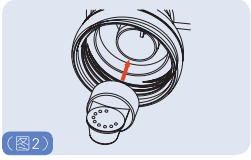


（图2）

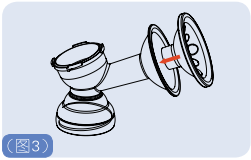


（图3）

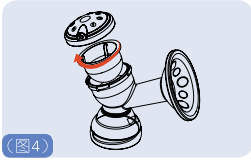


（图4）

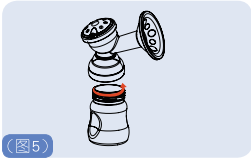

（图5）

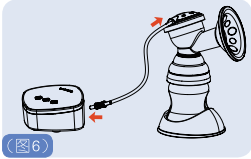

（图6）

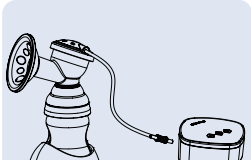

（图7）

1. 将防漏阀吸皮按压到防漏阀上；配合上不得有缝隙。（防漏阀吸皮上的半圆小凸点对准防漏阀上的半圆孔即可）（图 1 所示）（此硅胶片非常重要，如未装或未安装到位，会导致无吸力。）

2. 将防漏阀固定到吸乳器三通上，需按到底。（如图 2 所示）

3. 将喇叭口硅胶按摩垫安装于吸奶器三通上，确定其与吸奶器罩杯吻合紧贴。（如图 3 所示）

4. 将气缸放入吸乳器三通内，然后将气缸盖旋紧。（如图 4 所示）


5. 将奶瓶旋入吸乳器三通上。（如图 5 所示）

6. 将吸管插入气缸盖的吸力孔的小圆柱上，将吸管的另一端插入主机上的硅胶孔内，确保完全插入。（如图 6 所示）

7. 吸奶器组装全部完成，将 USB 线插头端插入主机电源孔中，再将 USB 插头端插入适配器，随时可以使用。用完以后，取下奶瓶。盖上奶嘴盖（防尘）将盛有乳汁的奶瓶放置在奶瓶底座内，随后保存好主机，如果不需要及时哺乳宝宝，乳汁应放置在水箱内储存，最后及时清洗吸奶器组件，以防奶水干固在零件上不好清洗。（如图 7 所示）

使用方式

面板说明

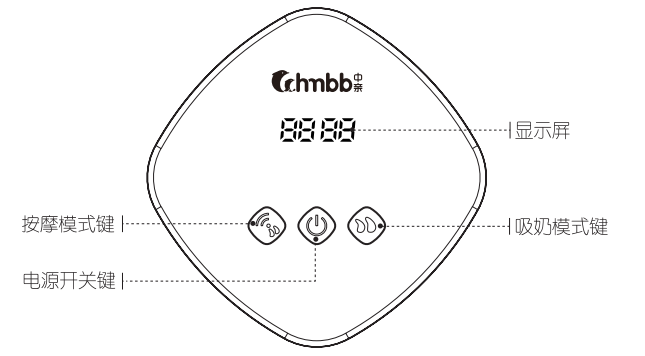

【电源开关键】长触摸 2 秒开机，再次触摸则关机

【按摩模式键】开机默认进入此模式 1 档，再次触摸则 2 档，依次循环，最高 8 档


【吸乳模式键】触摸此键进入此模式 1 档，再次触摸则 2 档，依次循环，最高 8 档

【显示屏】工作时显示时间，当触摸按摩键或吸乳键时短暂显示当前所处档位

如何使用智能吸乳器

- ① 建议用户使用前先用热毛巾敷乳房 5 分钟，有利于促进乳腺畅通，以便更有效更有效的吸奶。
 - ② 确认吸乳器的组件已彻底消毒并按照指示正确组装吸乳器。使用者请保持舒适坐姿并放松，用吸乳器的罩杯中央对准乳头，并紧贴乳房。确保没有空气进入，以确保正常的吸力。
- 注：奶瓶里的乳汁不要装的太满，不能超过奶瓶的最大容量，如达到最大容量请及时更换奶瓶再继续使用。
- ③ 吸乳完成后，关闭电源，并将插头拔掉。
 - ④ 请将相关配件拆卸并清洗干净。（主机，适配器组件，吸管除外）

妈妈们吸奶时，姿势要端正，不能斜着身体或是侧卧吸奶，否则乳汁会倒流

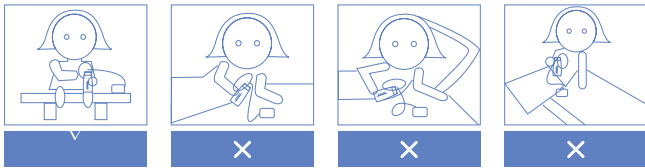

吸力档位指南

此电动吸奶器运用最新研发技术，八档位以产生最接近婴儿吮吸母乳的自然节奏，此吸奶器有自动挡吸奶模式，开机默认一档，最高至四档，每档 45 秒，档位越大吸力越大。当处于几档显示屏则显示该档位。

故障排除及常见问题

【一】主机无法启动

- 检查电池电量是否用尽，开机无反应，为电量过低，如开机闪烁后关机为电量不足，请及时充电。

【二】主机无法充电

- 可换手机充电器检查适配器是否损坏。

【三】无吸力

- 查看硅胶气缸是否有收缩动作，如无收缩检查气缸盖是否旋紧，或气缸破裂，如有收缩但无吸力，检查防漏阀是否安装及安装到位或拆卸各部件并重新安装。

【四】吸力不足

- 查看防漏阀上的密封吸皮是否安装及损坏
- 气管接头是否插到位
- 检查气管是否有折弯
- 检查三通喇叭硅胶是否与乳房贴合好

【五】吸乳器有吸力，但是吸不出来或很难吸出来

- 这是乳腺不通畅或者精神紧张导致的。
- 未在医院开过奶的，请先去医院开奶。
- 开过奶的，先用热毛巾敷十分钟，然后用仿生档来吸奶，吸 10 分钟后，调档位。如还是吸不出，热敷之后用手挤压按摩乳房，同时用手挤的方式把乳汁尽可能多的挤出，以做到疏通乳腺，下次使用吸乳器，有可能就吸的出了哦，多重复以上步骤，一定会得到改善吸乳难的问题哦。（吸奶困难时，先热敷，再吸奶，效果也会更好）
- 人精神紧张时，奶也会比较难吸出。先深呼吸放松心情，再吸奶，或换个时间再吸。

【六】感觉吸力小（真实情况并不小）

- 中亲电动吸乳器，最大档的喇叭口处吸力已经是达到 -21kpa，是乳房承受吸力的一个极限，再大会损伤乳腺，对乳房带来伤害，一般买家使用第 6~7 档已经足够正常的吸奶需求。部分买家奶比较难吸出，就把问题归结到吸乳器吸力不够上，这是一个严重的误区，此类型买家要做的是先疏通乳腺（用手能挤出奶，不代表乳腺就是完全通畅）

【七】吸奶疼痛

- 人体的耐受能力是不一样的，就好像去按摩院按摩一样，有些人很受力，而有些人却小力也喊疼。
- 感觉吸奶疼痛时，一方面摆正喇叭硅胶罩，确保乳头与硅胶口对正。另外可采用低档位。当吸乳次数增加，人体会适应这种吸力感觉，也就不会产生疼痛了。

【八】感觉吸奶慢

- 吸奶快慢是因入而异的，奶多、吸力大并不代表就一定吸得快。出奶没有别人快也是很正常的，另外，经常吸奶的话也会让吸奶更加顺畅起来呢。

【九】感觉吸不干净

- 人体乳房的结构是海绵体状的，乳汁是不可能吸得很干净的，（用手挤，总是会有），大部份（8 成以上）的乳汁被吸出，已经解决奶涨和吸奶储奶的根本需求了。