

故障排除

吸力不足，无吸力

- 查看有无装防漏阀或查看防漏阀是否装到位。
- 检查三通喇叭硅胶垫是否与乳房贴合密合。

警告与注意事项

▲ 警告：奶嘴

- * 奶嘴可能被咬破，对于正在长牙的宝宝要特别注意，奶嘴如果磨损，坏掉或穿孔应及时更换。每次使用前都需检查奶嘴。
- * 如果奶嘴直接暴晒在阳光下或长时间浸泡在消毒液中，会导致奶嘴易磨损及坏掉。
- * 首次使用之前，请放入沸腾的水中 5 分钟进行消毒。
- * 每次使用之前都要清洗消毒，使用本产品时一定要有成人在旁边照顾。
- * 请不要将奶嘴当成安抚奶嘴使用，持续使用且延长吸食奶嘴的时间容易造成蛀牙。
- * 喂食前一定要检查乳汁的温度，以免宝宝烫伤。

注意事项

- * 吸奶器由小零件组成，小心不要让您的宝宝将任何零件放入口中。
- * 如果使用吸奶器感到疼痛，请向医生或母乳哺乳顾问请教。
- * 勿让宝宝接触到本产品。
- * 不要将本产品用于任何非本册手册中描述之用途。
- * 只能使用吸奶器所附的零件或其他经过授权的中亲零件。

慈溪亲宝电器有限公司

Cixi Kissbaby Electrical Appliance Co., Ltd.

地址：浙江省慈溪市横河镇相土村轴承路 8 号

电话：0574-58979020

传真：0574-63831833

网址：www.zqmy.net

全国免费服务热线：400-188-9820



chmbb 中亲 Manual Breast Pump

手动仿真生吸奶器 使用说明书

货号
DP59



仿真生全硅胶大罩杯
柔软硅胶大罩杯，更好的
贴合乳房，仿真宝宝吸乳



180° 旋转手柄
自由调整手柄角度，
从而达到舒适轻松的吸奶姿势




全拆卸设计
可拆卸每个配件，
清洗无死角，干净卫生



安心材质
采用 PPSU、进口 PP 和硅胶
材质，不含双酚 A


组件及名称

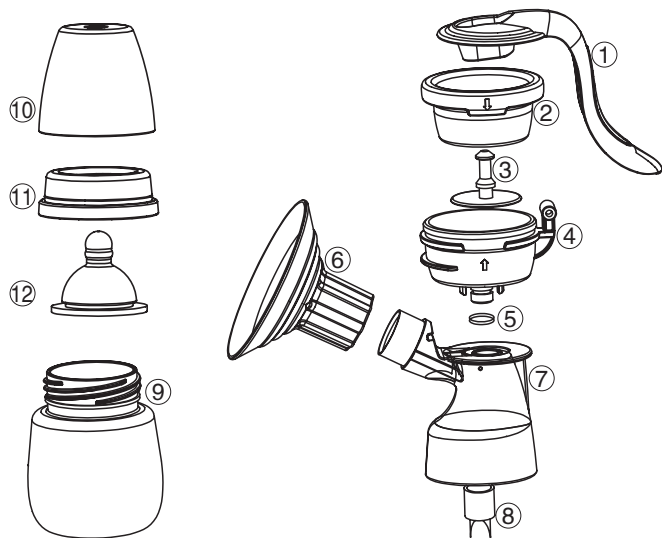

编号	名称	材料	耐热温度	耐冷温度	数量
1	手柄	PP	120℃	-20℃	1
2	气缸	硅胶	200℃	-20℃	1
3	气缸支架	PP	120℃	-20℃	1
4	气缸座	PP	120℃	-20℃	1
5	密封圈	硅胶	200℃	-20℃	1
6	硅胶喇叭	硅胶	200℃	-20℃	1
7	三通	PP	120℃	-20℃	1
8	防逆流阀	硅胶	200℃	-20℃	1
9	奶瓶	PPSU	180℃	-20℃	1
10	透明盖	PP	120℃	-20℃	1
11	奶瓶盖	PP	120℃	-20℃	1
12	奶嘴	硅胶	200℃	-20℃	1

组装方式

开始组装吸乳器前，请先洗净双手，使用前请务必消毒各部件！

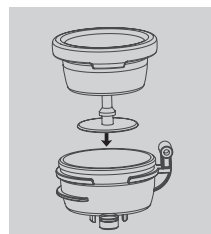

1. 安装气缸



2. 推入气缸



3. 安装防逆流阀



4. 安装奶瓶



5. 安装旋转手柄



6. 安装全硅胶乳垫

使用方式

准备工作

请确认吸奶器组件已彻底消毒并按照指示正确组装吸奶器。椅子旁边放上一杯水或其他饮料，洗净双手，坐在椅子上，用湿热的毛巾热敷并按摩乳房，按摩完后身体坐正并微微向前倾（不能侧卧，不能倾斜吸奶器）。使吸奶器罩杯内的喇叭硅胶中央对准乳头，并紧紧贴于乳房上，确保没有空气进入，以确保正常的吸力。

手动说明

左手握住吸奶器组件，右手握住手柄，用手指按压手柄，可根据自己的需求转动调整手柄方向位置。也可以调整按压力度来调整吸力的大小。